




Sidst revideret maj 2024

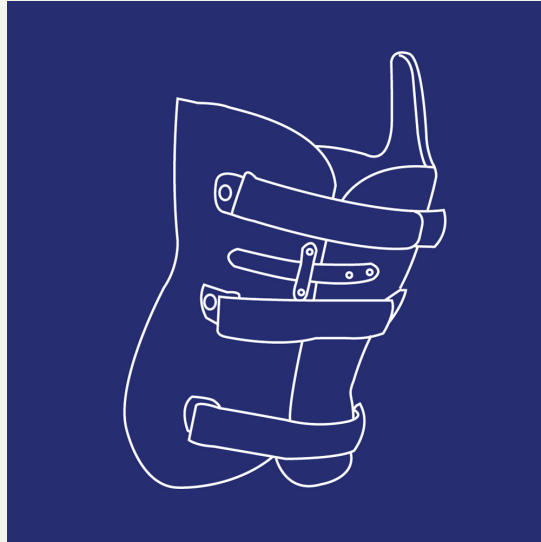

# Brugervejledning

Brønnum korset

**SN**

**REF**



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



## Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye korset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af korsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse bruger-vejledningen grundigt igennem.

Korsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen.

Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

## Beskrivelse af produkt

### Funktion

At stabilisere rygsøjlen.

### Indikation

Nyopererede neuromuskulære scolioser (lateral deviation af rygsøjlen).

### Materialer

Korsettet er opbygget i termoplastisk materiale, der er foret med en blød polstring indvendigt.

### Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn, der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

## Brug af produktet

### Påtagning

Påtagning (liggende)

- Tag undertrøjen på og sørg for, der ikke er folder.
- Rul om på den ene side.
- Rygskjoldet skubbes så langt ind under ryggen som muligt.
- Kontroller at taljemarkeringen er ud for taljen.
- Rul tilbage på ryggen i rygskjoldet.
- Forskjoldet sættes nu på ved at styrerne føres ind i beslagene på bagskjoldet.
- Velcrostropperne (tre styk i hver side) strammes. Korsettet skal sidde så stramt som muligt med jævnt tryk.
- Korsettet skal stå en centimeter åben i hver side.

### Aftagning

- Løs alle stropperne.
- Tag fat i begge sider af forskjoldet og løft dette af.
- Rul om på den ene side og tag rygskjoldet væk.

### Pleje af huden

- Tag bad hver dag (brusebad eller karbad).
- Bær altid en bomuldstrøje, uden søm, nærmest kroppen.
- Skift undertøj ofte.
- Anvend altid trusser uden på korsettet (bleer kan af hygiejniske årsager anvendes under korsettet).
- Brug ikke pudder under korsettet.
- Ved brug af creme på kroppen, er det vigtigt, at den er trængt helt ind i huden, før korsettet tages på.

### Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen.

Alt sammen kan være med til at ændre korsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du



oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

#### **Særlige risici**

Trykmærker, der ikke forsvinder efter 20 minutter, er tegn på for højt tryk og kan udvikle sig til tryksår.

#### **Allergi**

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

#### **Pleje af korsettet**

Korsettet skal gøres rent hver dag både indvendigt og udvendigt. Du kan vaske det med almindelig sæbeopløsning. Skyl grundigt for at undgå sæberester, der kan irritere huden. Tør bagefter med frottéhåndklæde eller viskestykke. Hvis skumgummien har suget vand, skal det presses ud. Lad ikke korsettet tørre ved et varmeelement eller i solen, da korsettet i så fald kan blive blødt og ændre form.

#### **Bortskaffelse/returnering**

Korsettet kan afleveres eller sendes til en af Sahvas afdelinger, når det ikke længere passer eller er slidt op, hvis du ikke selv ønsker at beholde eller bortskaffe det.

### **Reparation/Fornyelse af produkt**

#### **Ansøgningsregler**

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

### **Garanti og reklamation**

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.

Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning

– dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationersret.

### **Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter**

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr

i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning. Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

